

NeoClean 240

ENGANGS NEOPREN HANDSKE

- Meget flexibel neoprenhandske
- Perfekt for tandlæger, laboratorier, hospitaler og mange andre områder.
- Super fit og flexibelt med ergonomic design
- Ambidextrous
- Ikke Steril
- AQL 1.0
- Pulverfri



MATERIALE	TYPE	LÆNGDE
Neopren	Engangshandske	240 mm.

VARE NO.	STØRRELSE	FARVE	ÆSKER PR. KARTON
8880240-S	Small	Grøn	10 x 100 pcs.
8880240-M	Medium	Grøn	10 x 100 pcs.
8880240-L	Large	Grøn	10 x 100 pcs.
8880240-XL	X-Large	Grøn	10 x 100 pcs.
8880240-XXL	XX-Large	Grøn	10 x 100 pcs.



KEMIKALIETEST



NeoClean 240 Neopren handske

KEMIKALIE	CAS NO:	KONCENTRATION	GENNEMBRUDSTID	LEVEL
Acetic Acid	64-19-7	≥99,7 %	4 min.	
Ammonium Hydroxide	1336-21-6	28-30 %	21 min.	
Citric Acid	5949-29-1	5 %	480 min.	
Dimethyl Sulfoxide	67-68-5	≥99,5 %	33 min.	
Ethanol	64-17-5	70 %	45 min.	
Formaldehyde	50-00-0	37 %	325 min.	
Heptane	142-82-5	≥99 %	64 min.	
Hydrochloric Acid	7647-01-0	37 %	115 min.	
Hydrofluoric Acid	7664-39-3	40 %	6 min.	
Hydrogen Peroxide	7722-841	30 %	91 min.	
Isopropanol	67-63-0 99	5 %	48 min.	
Methanol	67-56-1	≥99,9 %	5 min.	
Nitric Acid	7697-37-2	65 %	6 min.	
Sodium Chloride	7758-19-2	10 %	480 min.	
Sodium Hydroxide	1310-73-2	40 %	480 min.	
Sulfuric acid	7664-93-9	95-98 %	8 min.	

Opdateret: 23.11.2022

Testet i henhold til EN 16523-1:2015